

FR Mode d'emploi

Pompe respiratoire HK pour veaux #1032

La pompe respiratoire HK du vétérinaire Dr Bron est adaptée à l'extraction des glaires de la bouche et du nez des veaux nouveau-nés et pour faciliter la circulation

sanguine après des vélages particulièrement difficiles.

1. Extraction des glaires de la bouche et du nez chez les veaux nouveau-nés.

Une importante quantité de glaires dans la bouche et le nez des veaux peut conduire

à des problèmes considérables lors des premiers mouvements respiratoires

du veau, même jusqu'à la mort. L'extraction des glaires à la main est alors absolument

insuffisante. La pompe respiratoire HK permet de remédier à ce problème.

Appuyer avec une légère pression l'ouverture du manchon en caoutchouc sur la

bouche et le nez, puis aspirer les glaires par une traction sur la poignée-étoile.

Retirer ensuite la pompe respiratoire HK et l'orienter sur le côté. En appuyant sur

la poignée étoile, le piston à l'intérieur de la pompe respiratoire HK est ramené

vers le bas et les glaires aspirées s'écoulent. Répéter ce processus plusieurs fois

si nécessaire, jusqu'à avoir aspiré l'essentiel des glaires.

2. Facilitation rapide de la circulation sanguine après les vélages particulièrement

difficiles. Le vêlage est un processus très éprouvant pour la vache et

le veau. Lors des vélages difficiles liés à des contractions trop faibles, un mauvais

positionnement du veau ou un veau de trop grande taille, la pression exercée

pendant un certain temps sur la poitrine du veau peut avoir une influence décisive

sur l'avenir du nouveau-né. Le déploiement des poumons et l'enclenchement

d'une activité respiratoire normale peuvent être assistés considérablement par la

pompe respiratoire HK. Pour la ventilation et la facilitation de la respiration, tirer

sur la poignée-étoile pour sortir jusqu'à la butée le piston à l'intérieur de la pompe

respiratoire HK. Placer ensuite le manchon en plastique sur le nez et la bouche du

veau, puis appuyer lentement la poignée-étoile vers le bas. Répéter ce processus

plusieurs fois si nécessaire.

Consigne importante : Nettoyer et désinfecter soigneusement la pompe respiratoire

HK après chaque utilisation. Stocker au propre et au sec.

Nous accordons une garantie selon nos conditions de garantie générales